

Het complete programma voor
ziekenhuis, praktijk en laboratorium





Hoogwaardig metalen slot met modern design
Appart en fijn gedoseerd ontstuwen
Huidvriendelijk, duurzaam katoenweefsel
Latex-vrij en autoclaveerbaar



De groene stuwband 902



Veilige canulering door fixatie van de ader

Punctieader blijft ongestuwd

Snelle bloedafname zonder kwaliteitsverlies

Optimale adervulling - vereenvoudigde punctie
ook bij grote, holle canules

Medicijntoediening bij liggende stuwband in
vrij stromend bloed

Verminderde weefselacidose bij langer durende
stuwing

Ook als normale aderstuwband te gebruiken.
Daarom geschikt voor de uitrusting van
dokterstassen en EHBO-koffers.

De Easy-Stuwband 904

De uiterst efficiënte aderstuwband
met het unieke functiespectrum





De grijze Stuwband 901

Eenvoudig te gebruiken door bewezen techniek

Hoogwaardig metalen slot voor fijn gedoseerd ontstuwen

Huidvriendelijk, duurzaam katoenweefsel

Autoklaveerbaar



906 Magic + Zoo

Aantrekkelijk patroon van dieren en tovenaars

Modern & prijs-winnend design

Perfect ergonomisch

Appart en fijn gedoseerd ontstuwen

Geen afknelling van de huid ook bij dunne armpjes

Autoclaveerbaar en metaalvrij



Bloedingen stelpen snel, gericht, gedoseerd en met visuele controle

Punctuele drukverhoging door compressieplaat

Continue regeling van de compressiedruk

Compressie van traumatische bloedingen aan het hoofd en extremiteiten

Compressie van slagaderlijke punctieplaatsen

"Klok" voor het bijhouden van het moment waarop met het stuwen werd begonnen

Toepassingsvoorbeelden

1 Binnen enkele seconden aangelegd als compressieverband. Drukverhoging door aantrekken van de stuwband. Door met de duim op de slotknop te drukken, wordt de compressie traploos verminderd.

2 Ideaal hulpmiddel voor onbloedige adertlating bij longoedeem voor snelle cardiale ontlasting.

3 Te gebruiken als compressieverband ter voorkoming van hematomen na angiografie.

4 Te gebruiken als compressieverband bij flebografie.

5 Bewegingloos maken resp. spalken van armen en benen bij fractures, mogelijke fractures.

6 Fixatie resp. bewegingloos maken van armen en benen op de brancard ter beveiliging van de patiënt tijdens het transport

7 Bij sport- of bedrijfsongevallen te gebruiken als EHBO-stuwband ter voorkoming van hematomen aan weke delen.

8 Stilstand van een slagaderlijke bloeding aan de slapen met behulp van een klembeugel.



De EHBO-stuwband 910 A

Professioneel hulpmiddel bij reddingswerkzaamheden voor de compressie van traumatische bloedingen aan hoofd en extremiteiten

"Technische wijzigingen voorbehouden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor drukfouten of vergissingen."