

So einfach ziehen Sie AquaProtect über – ganz ohne Klebestreifen oder Gummiband.



Bei rauhem Gips o.ä. zunächst einen Strumpf überziehen, um eine Beschädigung zu vermeiden. Offene Wunden abdecken.



AquaProtect ist sehr dehnbar – einfach überstreifen und so weit wie möglich hochziehen. Durch leichtes Zurückziehen Dichtlippe im Muskelbereich flach anlegen lassen.



Falls das Material zu stramm anliegt und/oder sich am Ende aufrollt, die Öffnung mehrmals kräftig vorrecken, um die Spannung anzupassen. Fertig zum Duschen. Zum Baden und Schwimmen

zunächst Arm/Bein vorsichtig weitgehend eintauchen. An einer Ecke ziehen und die Luft herauslassen. Dichtlippe wieder herstellen. Fertig zum Baden.

AquaProtect®


AquaProtect	Modell	Länge ±	Umfang
Unterarm, groß	AP 21	54 cm	≥ 22 cm
Unterarm, klein	AP 17	43 cm	≥ 17 cm
Oberarm, groß	AP 31	80 cm	≥ 26 cm
Oberarm, klein	AP 26	66 cm	≥ 19 cm
Unterschenkel, groß	LP 25	64 cm	≥ 32 cm
Unterschenkel, klein	LP 20	51 cm	≥ 24 cm
Oberschenkel, groß	LP 44	112 cm	≥ 47 cm
Oberschenkel, klein	LP 33	84 cm	≥ 31 cm



Schützt
den Verband
im Bad und am
Strand!

AquaProtect®

 PRAMETA

Genker Strasse 16 • D-53842 Troisdorf
Tel. +49(0)2241.23996-0 • Fax +49(0)2241.23996-33
info@praemeta.de • www.praemeta.de 

03/07 • Technische Änderungen vorbehalten. Keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.

AquaProtect®

Modelle für Unter- und Oberarm



AquaProtect macht das Leben mit einem Verband einfacher.

Eine erfrischende Dusche oder gar ein entspannendes Vollbad – das geht jetzt ganz mühelos. Auch der Abwasch oder feucht Aufwischen sind kein Problem: Sie streifen AquaProtect über den Verband und haben ihn 100 % wasserdicht geschützt.

Modelle für Unter- und Oberschenkel



Schützt den Verband im Bad und am Strand!

AquaProtect ist ein Schutzüberzug aus hautfreundlichem Polyurethan.

Es gibt acht Modelle: jeweils zwei Größen für Unterarm, Oberarm, Unterschenkel und Oberschenkel.

Die Beinmodelle haben eine rutschfeste Sohle, die für Halt und Sicherheit sorgt.

Das Material ist absolut frei von Latex.

AquaProtect ist sehr robust.

Es kann viele Male wiederverwendet werden.

Sie erhalten AquaProtect in der Apotheke und im Sanitätsfachhandel.

AquaProtect®

Alle Modelle auch
in kleinen Größen.



AquaProtect schützt Arm- und Beinverbände nicht nur beim Duschen und Baden wirkungsvoll vor Wasser, sondern auch im Schwimmbad und beim Wassersport.

Ob beim Schwimmen oder Tauchen – AquaProtect hält dicht.

Auch für den
Wassersport

