

Das komplette Programm für Klinik, Praxis und Labor





**Sichere Kanülierung
durch Fixierung der Vene**

Punktionsvene bleibt ungestaut

**Zügige Blutentnahme
ohne qualitative Kompromisse**

**Optimale Venenfüllung - vereinfachte Punktion
auch mit großlumigen Kanülen**

**Medikamentengabe bei liegendem Stauer
in ungehindert fließendes Blut**

**Reduzierte Gewebs-Acidose
bei länger dauerndem Stauvorgang**

Auch als normaler Venenstauer zu verwenden.
Daher geeignet für die Ausstattung von Arztta-
schen und Notfallkoffern.

Der Easy-Stauer 904

Der hoch effiziente Venenstauer
mit dem einzigartigen Funktionsspektrum





Hochwertiges Metallschloss mit modernem Design

Separates, fein dosiertes Entstauen

Hautfreundliches, dauerhaftes Baumwollgewebe

Latex-frei und autoklavierbar



Der grüne Stauer 902



Der graue Stauer 901

Einfache Handhabung durch bewährte Technik

Hochwertiges Metallschloss
für fein dosiertes Entstauen

Hautfreundliches, dauerhaftes Baumwollgewebe

Autoklavierbar



Attraktive Tier- und Zauberer-Motive

Preisgekröntes modernes Design

Perfekte Ergonomie

Separates, fein dosiertes Entstauen

Kein Einklemmen der Haut - auch bei dünnen Ärmchen

Autoklavierbar und metallfrei

906 Magic + Zoo



Blutungen stillen
schnell, gezielt, dosiert und mit Sichtkontrolle

Punktueller Druckerhöhung
durch Kompressionsplatte

Jederzeitige Regulierung
des Kompressionsdrucks

Kompression traumatischer Blutungen
an Kopf und Extremitäten

Kompression arterieller Punktionsstellen

„Uhr“ zum Festhalten des Staubebeginns

Anwendungsbeispiele

1 In Sekunden angelegt als Kompressionsverband. Erhöhung des Drucks durch Festziehen des Staubandes, durch Daumendruck auf die Schlosstaste wird die Kompression stufenlos reduziert.

2 Ideales Hilfsmittel für den unblutigen Aderlass bei Lungenödem für schnelle kardiale Entlastung.

3 Einsatz als Kompressionsverband zur Hämatom-Vermeidung nach Angiographie.

4 Anwendung als Kompressionsverband bei Phlebographie.

5 Ruhigstellung bzw. Schienung von Armen und Beinen bei Fraktur, Frakturverdacht.

6 Befestigung bzw. Ruhigstellung von Armen und Beinen an der Trage zur Sicherung des Patienten beim Transport.

7 Bei Sport- oder Arbeitsunfällen: Der Notfall-Stauer zur Prophylaxe von Weichteilhämatomen.

8 Stillstand einer arteriellen Blutung im Schläfenbereich mittels Klemmbügel.



Der Notfallstauer 910 A

Professionelles Hilfsmittel im Rettungswesen
für die Kompression traumatischer Blutungen an Kopf und Extremitäten

Zubehör: Ersatzband = 904-4